


Registra il tuo strumento
per aiuto e assistenza:
OneTouch.it/benvenuto



Il sistema OneTouch Select® Plus


Guida rapida

Aiuta a comprendere il significato dei risultati

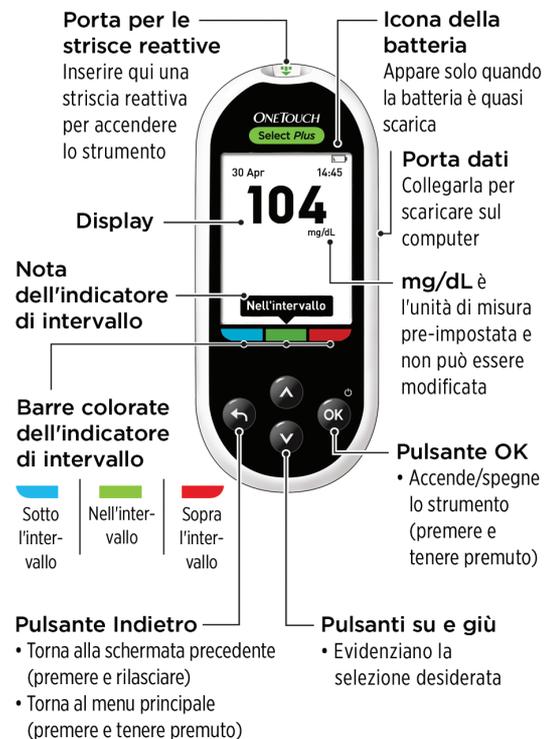

IMPORTANTE: leggere il Manuale per l'utente fornito con il sistema.

L'indicatore di intervallo indica istantaneamente quando si è nell'intervallo e quando no.

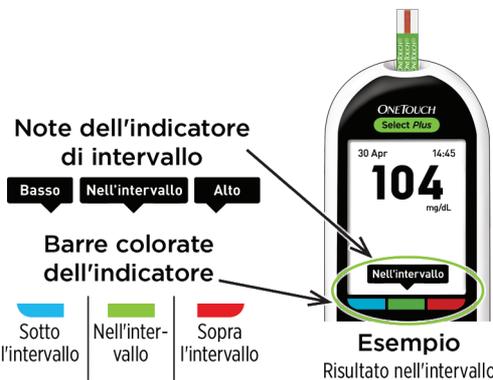

- Lo strumento viene fornito con limiti preimpostati per l'intervallo "Generale", che vengono applicati a tutti i risultati (quando la funzione Note Pasto non è attiva). È possibile modificare i limiti dell'intervallo "Generale" in base alle proprie esigenze.
- Una nota dell'indicatore di intervallo comparirà sotto il risultato e ad essa è abbinata la corrispondente barra colorata dell'indicatore di intervallo sotto lo schermo dello strumento.
- Sapere quando si è nell'intervallo** oppure no può aiutare a:
 - Mantenere un miglior controllo*
 - Raggiungere gli obiettivi glicemici stabiliti*


*In uno studio di ricerca di mercato condotto nel luglio 2012 con 75 medici negli Stati Uniti, 8 medici su 10 erano d'accordo. LifeScan, dati in archivio.

**Si raccomanda di consultare il proprio medico riguardo ai limiti bassi e alti più appropriati per la propria condizione.

L'impostazione è semplice.
Proprio come l'esecuzione di un test.

Inizio:

1. Premere **OK** per accendere lo strumento.
 - Impostare l'ora, la data e i limiti di intervallo "Generale" che vengono usati per determinare se i risultati del test rientrano nei limiti dell'intervallo oppure se sono inferiori o superiori ad essi.

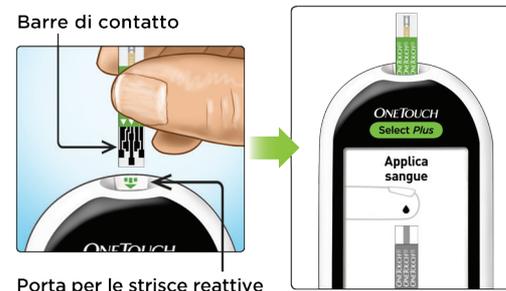

Test:

2. Inserire una striscia reattiva per eseguire il test.
3. Prima di applicare una goccia di sangue alla striscia reattiva, attendere che compaia la schermata **Applica sangue**.
 - I risultati sono pronti dopo circa 5 secondi.

Visualizzazione delle medie nel tempo, comprese quelle Pre-Pasto e Post-Pasto.



- Evidenziare **Medie** nel menu principale e premere **OK** per visualizzare le medie relative a periodi di 7, 14, 30 e 90 giorni.



Medie Pre-Pasto	
7 giorni	116 mg/dL
14 giorni	112 mg/dL
30 giorni	112 mg/dL
90 giorni	101 mg/dL

Pagina 2 di 3

- Se la funzione Note Pasto è attiva:
- Premere o per visualizzare le medie Pre-Pasto o quelle Post-Pasto.



AW 06834404A

La funzione Note Pasto aiuta a vedere come le scelte alimentari influiscono sui risultati.

- L'aggiunta di note consente di organizzare i risultati relativi ai pasti. Per usare questa funzione è necessario attivare Note Pasto e impostare i limiti dell'intervallo "Pasto".



- Una volta apparso il risultato, premere o per evidenziare **Pre-Pasto** () , **Post-Pasto** () o **No nota** e premere **OK**. La nota apparirà sotto al risultato, a meno che non sia stata selezionata l'opzione **No nota**.



- La funzione Indicatore di intervallo mostra automaticamente la Nota dell'indicatore di intervallo appropriata e la corrispondente Barra colorata dell'indicatore di intervallo.

La nota appare qui

Alcuni rapidi consigli

- La funzione di retroilluminazione si attiva automaticamente all'accensione dello strumento. Dopo circa 20 secondi di inattività, la retroilluminazione si disattiva. Premendo un tasto qualsiasi o inserendo una striscia reattiva si riattiva la retroilluminazione.
- Scorrere le impostazioni più rapidamente tenendo premuti i pulsanti o quando si effettuano le selezioni.
- I risultati possono essere scaricati su un PC per un'ulteriore analisi.
- Lo strumento conserva gli ultimi 500 risultati, quindi è possibile monitorare i progressi.



LifeScan Deutschland GmbH
Niederlasser Lohweg 18
40547 Duesseldorf, Germany



LifeScan

LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug
Switzerland

Contattare il Servizio Clienti OneTouch® numero 800-822000.

www.OneTouch.it

Data di rev.: 04/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC