


Utilizzare questa guida per conoscere lo strumento e seguire i passaggi indicati per iniziare.

**IMPORTANTE:** leggere il Manuale per l'utente fornito con il sistema.

## Icone dello strumento

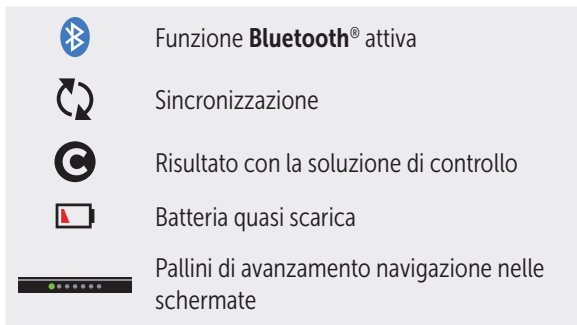

Per i simboli e le icone dello strumento e i relativi significati, fare riferimento al Manuale per l'utente.

**EC REP** LifeScan Deutschland GmbH  
Niederkaßeler Lohweg 18  
40547 Duesseldorf, Germany

Produttore:  
LifeScan Europe GmbH  
Dammstrasse 19  
6300 Zug  
Switzerland

Contattare il Servizio Clienti  
OneTouch al numero 800-822000.  
Il servizio è operativo da lunedì a  
venerdì dalle 8:30 alle 19:00. Oppure  
visitare il sito [www.OneTouch.it](http://www.OneTouch.it).

Consultare le istruzioni per l'uso



**Lifescan**

OneTouch®  
AW 07185302A  
© 2018-2023 LifeScan  
IP Holdings, LLC  
Data di rev.: 03/2023

**CE**  
0344

# 1 Configurazione dello strumento

## Accensione dello strumento

Tenere premuto **OK** fino alla visualizzazione della schermata di benvenuto.

Usare i pulsanti **↑** o **↓** per modificare ciascuna impostazione, poi premere **OK** per confermare.

## Impostazione della lingua

Evidenziare la lingua desiderata, quindi premere **OK**.

## Opzionale: completare la configurazione usando l'app per dispositivi mobili OneTouch Reveal®\*

Selezionare **Sì** affinché l'app visualizzi una guida per la configurazione.



## Scaricare l'app per dispositivi mobili OneTouch Reveal® prima di associare lo strumento e il dispositivo mobile.



## Impostazione dell'ora

Premere **OK** se l'ora è corretta oppure modificarla e poi confermarla.

\* Visitare il sito [www.OneTouch.it](http://www.OneTouch.it) per avere maggiori informazioni sull'app per dispositivi mobili OneTouch Reveal® e sulla disponibilità nel proprio paese.

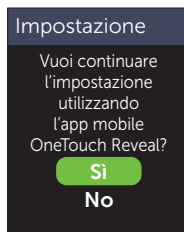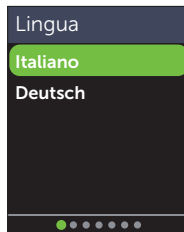

## Impostazione della data

Premere **OK** se la data è corretta oppure modificarla e poi confermarla.

## Impostazione dei limiti dell'intervallo per i pasti

Premere **OK** se i limiti preimpostati dell'intervallo Pre-Pasto e Post-Pasto sono corretti o modificarli e poi confermarli.




## Impostazione del Test Tracker

Premere **OK** se l'obiettivo preimpostato è corretto oppure modificarlo e poi confermarlo.

## Impostazione del target medio su 90 giorni

Premere **OK** se il target medio su 90 giorni è corretto oppure modificarlo e poi confermarlo.

**NOTA:** discutere con il proprio medico dei valori adeguati per i limiti corretti per l'intervallo, l'obiettivo di test giornaliero e il target medio su 90 giorni.

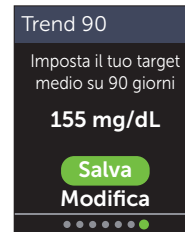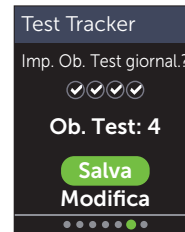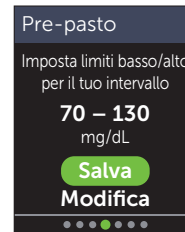

# 2 Esecuzione di un test


Lavarsi le mani con acqua calda e sapone, sciacquarle e asciugarle prima del prelievo di campione. Rimuovere il cappuccio del dispositivo pungidito, quindi inserire una lancetta sterile. Ruotare il coperchio di protezione. Riposizionare il cappuccio sul dispositivo.

Per accendere lo strumento, inserire una striscia reattiva (con il lato dorato e i 2 denti in argento rivolti verso l'operatore).


Regolare l'impostazione della profondità sul dispositivo pungidito. Caricare il dispositivo pungidito e tenerlo saldamente contro un lato del dito. Premere il pulsante di rilascio. Comprimerne delicatamente il dito per ottenere una goccia di sangue rotonda.

Applicare un campione di sangue sul canale presente su uno dei due lati della striscia reattiva.


Quando il canale si riempie, diventerà rosso e il risultato sarà visualizzato dopo circa 5 secondi.

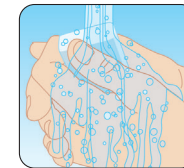


Denti in argento

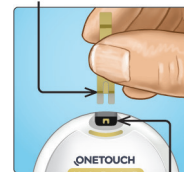

Porta per le strisce reattive

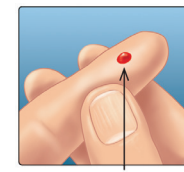

Dimensione approssimativa

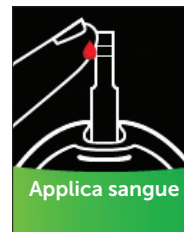


Applica sangue

### 3 Visualizzazione del risultato

#### Indicatore di intervallo dinamico ColourSure®

L'indicatore di intervallo dinamico ColourSure® consente di sapere istantaneamente se il risultato è inferiore (blu), superiore (rosso) o compreso nei limiti dell'intervallo (verde). Mostra anche quando il risultato è vicino al limite alto o basso dell'intervallo target. Una nota di testo o un emoji punta ad un segmento della barra colorata.

#### Esempi di risultati

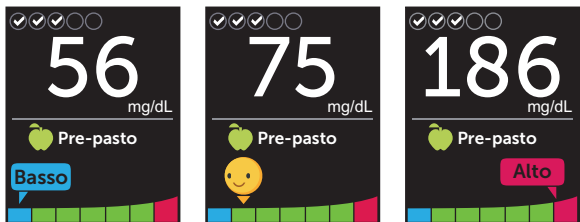

Sotto l'intervallo      Limite basso dell'intervallo      Sopra l'intervallo

#### Aggiunta di note pasto e note evento


Una nota Pre-pasto (🍏) sarà applicata automaticamente al risultato. È possibile cambiare la nota pasto in Post-pasto (🍷) e aggiungere una nota evento.



### Messaggi del Tutor della glicemia (Blood Sugar Mentor™)

Il Tutor della glicemia (Blood Sugar Mentor™) fornisce informazioni sullo stato di salute e una guida per la gestione del diabete, compresi messaggi formativi e motivazionali in base ai risultati attuali e precedenti della glicemia e ad altri dati monitorati.

#### Esempi di messaggi del Tutor della glicemia (Blood Sugar Mentor™)

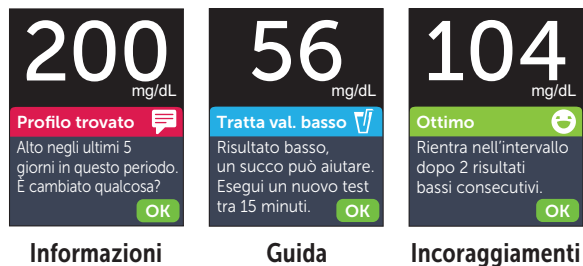


Il marchio e i loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a LifeScan Scotland Ltd. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.


### 4 Collegamento ad un dispositivo mobile

La tecnologia **Bluetooth®** consente di inviare via wireless i risultati ad un dispositivo mobile in cui è possibile usare l'app per dispositivi mobili OneTouch Reveal® per rivedere e tracciare dei grafici dei risultati, impostare gli obiettivi di test giornalieri, vedere i messaggi del Tutor della glicemia (Blood Sugar Mentor™) e individuare i profili.


Nel menu Impostazioni evidenziare **Bluetooth** e premere (OK).

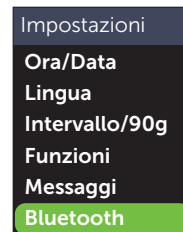

Il simbolo ✓ indica se **Bluetooth®** è attualmente impostato su On oppure Off.

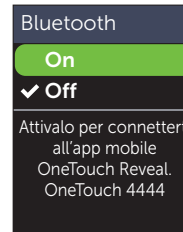

Premere (↶) o (↷) per cambiare lo stato **Bluetooth®** su On e premere (OK).

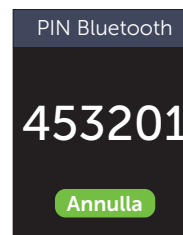

Quando richiesto dal dispositivo mobile, inserire il PIN mostrato.

Esempio di PIN

Registra il tuo strumento per aiuto e assistenza: [OneTouch.it/benvenuto](http://OneTouch.it/benvenuto)



# ONETOUCH Verio Reflect®

Sistema di monitoraggio della glicemia

## Guida rapida



AW 07185302A